

The logo for Claio, featuring the word "Claio" in a bold, blue, sans-serif font with a slight 3D effect. It is centered within a light blue rounded rectangular border.

Claio

簡易操作マニュアル

The logo for Radiance ware, featuring the word "Radiance" in a blue, sans-serif font with a stylized "R" that has horizontal stripes, followed by the word "ware" in a plain blue, sans-serif font.

Radiance ware

2013 年 7 月 作成

● ○ 目 次 ○ ●


Claio を立ち上げる	1
患者画像ビューアを開く	2
フットスイッチ	5
スキャナ画像の入れ方	6
画像の削除方法	9
画像種別	10
シェーマ	11
カルテへ送る	13
患者画像ビューアを閉じる	14

Claioを立ち上げる

1. デスクトップのClaioアイコンをダブルクリックします。




2. ログイン画面が表示されアカウント名・パスワードを入力しログインをクリックします。

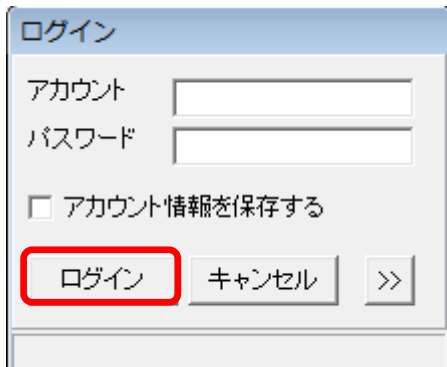A login dialog box titled 'ログイン' (Login). It contains two input fields for 'アカウント' (Account) and 'パスワード' (Password). Below these is a checkbox labeled 'アカウント情報を保存する' (Save account information). At the bottom are three buttons: 'ログイン' (Login), 'キャンセル' (Cancel), and '>>'. The 'ログイン' button is highlighted with a red rectangle.

アカウント:

パスワード


3. 患者一覧ウィンドウが表示されます。

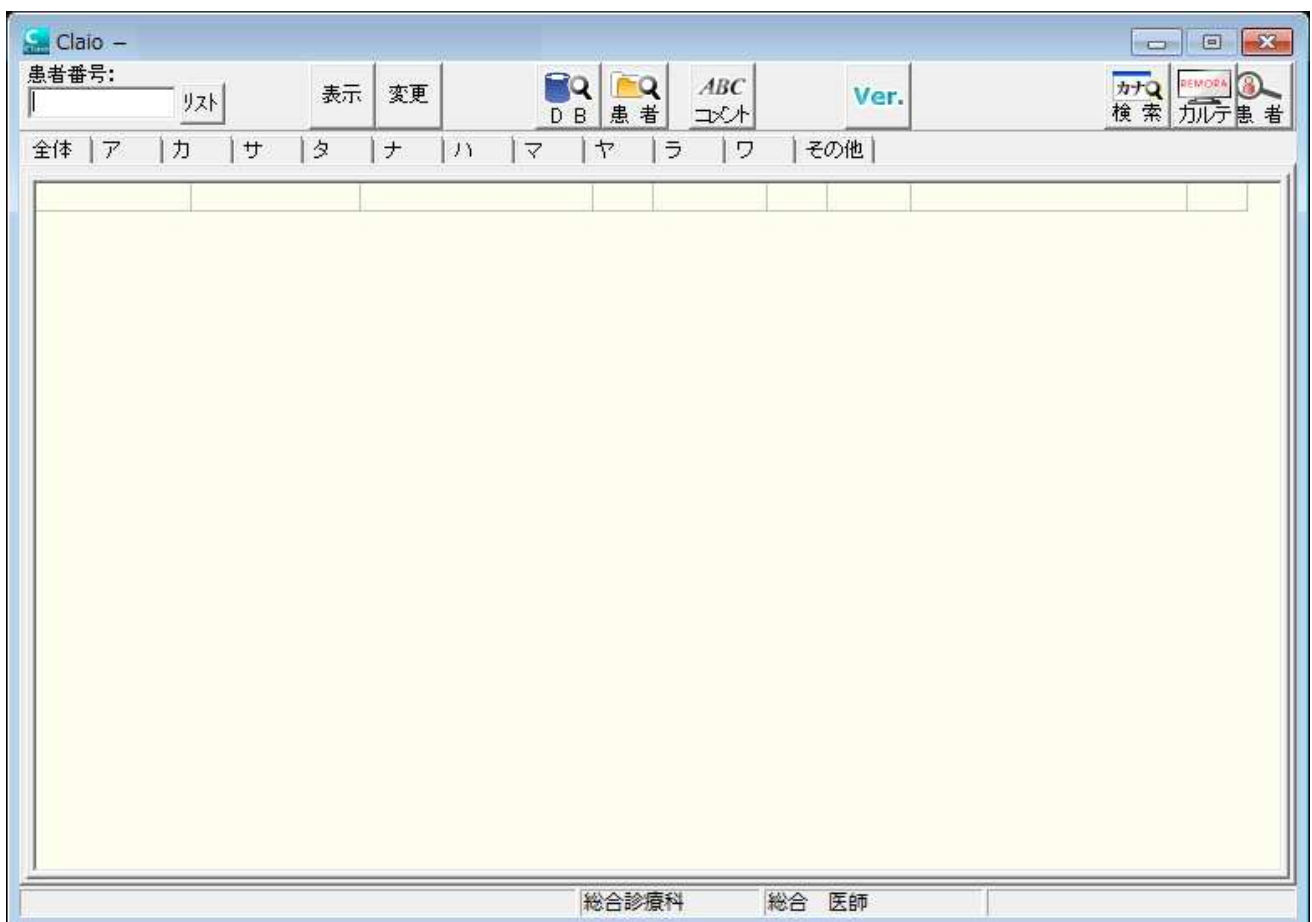A screenshot of the 'Claio' application window. The title bar says 'Claio -'. The main area is a large, empty table with a light yellow background. Above the table is a toolbar with buttons for '患者番号:' (Patient number), 'リスト' (List), '表示' (Display), '変更' (Change), 'DB' (Database), '患者' (Patient), 'ABC' (ABC), 'コメント' (Comment), 'Ver.' (Version), 'カナQ' (Kana Q), '検索' (Search), 'REMOVA' (Remove), and 'カルテ患者' (Medical record patient). Below the toolbar is a row of buttons for '全体' (All), 'ア' (A), 'カ' (Ka), 'サ' (Sa), 'タ' (Ta), 'ナ' (Na), 'ハ' (Ha), 'マ' (Ma), 'ヤ' (Ya), 'ラ' (Ra), 'ワ' (Wa), and 'その他' (Others). At the bottom of the window, there are two tabs: '総合診療科' (General Medicine) and '総合 医師' (General Physician).

患者画像ビューアを開く


1. 下図ウィンドウの全体タブをクリックして、表示される患者一覧より患者をダブルクリックか選択した状態で表示ボタンをクリックします。

※または受付表等のバーコードを読み取ります。

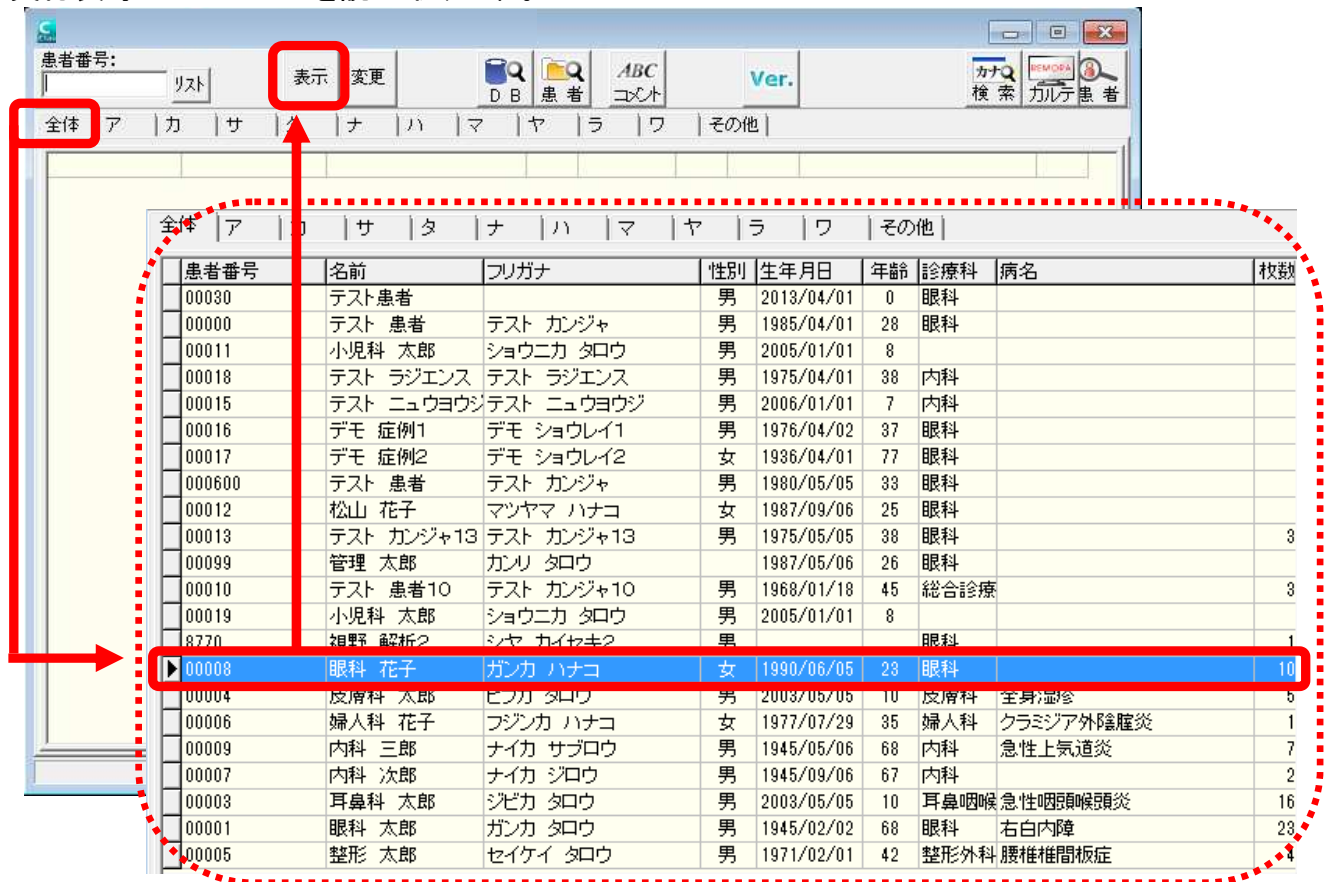

※レセコン上で患者の情報が変わった時には患者を選択した状態で変更ボタンをクリックします。

※名前・性別・生年月日・年齢

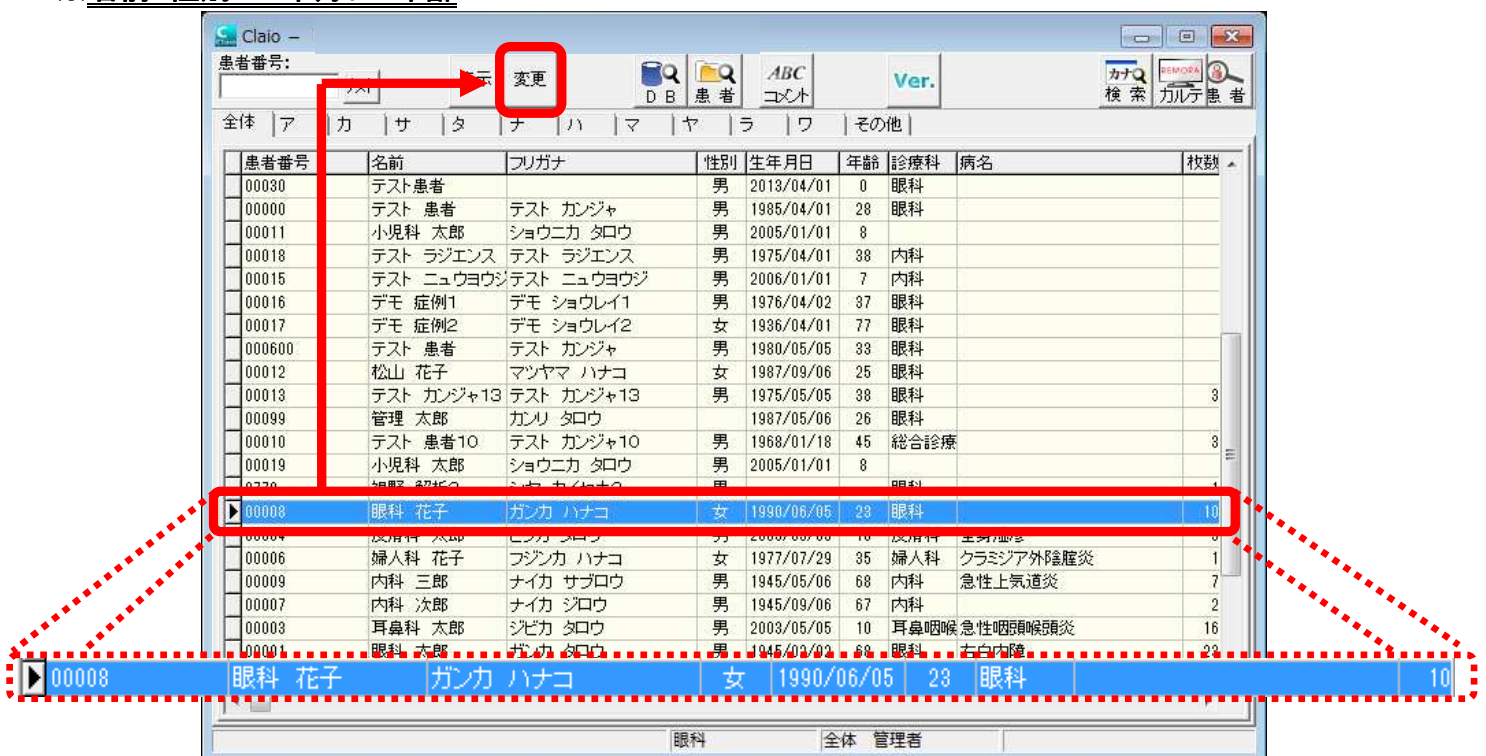


※確認画面が出るので「はい」をクリックします。





※患者情報が変更されます。

患者番号	名前	フリガナ	性別	生年月日	年齢	診療科	病名	枚数
00030	テスト患者	テスト カンジャ	男	2013/04/01	0	眼科		
00000	テスト 患者	テスト カンジャ	男	1985/04/01	28	眼科		
00011	小児科 太郎	ショウニカ タロウ	男	2005/01/01	8			
00018	テスト ラジエンス	テスト ラジエンス	男	1975/04/01	38	内科		
00015	テスト ニュウウジ	テスト ニュウウジ	男	2006/01/01	7	内科		
00016	デモ 症例1	デモ ショウレイ1	男	1976/04/02	37	眼科		
00017	デモ 症例2	デモ ショウレイ2	女	1936/04/01	77	眼科		
000600	テスト 患者	テスト カンジャ	男	1980/05/05	33	眼科		
00012	松山 花子	マツヤマ ハナコ	女	1987/09/06	25	心療内科		
00013	テスト カンジャ13	テスト カンジャ13	男	1975/05/05	38	眼科		3
00099	管理 太郎	カンリ タロウ	男	1987/05/06	26	眼科		
00010	テスト 患者10	テスト カンジャ10	男	1968/01/18	45	総合診療		3
00019	小児科 太郎	ショウニカ タロウ	男	2005/01/01	8			
8770	視野 解析2	シヤ カイセキ2	男			眼科		1
00008	眼科 鼻仔	ガンカ ハナコ	女	1993/06/05	20	眼科		10
00004	皮膚科 太郎	ヒダカ タロウ	男	2003/05/05	10	皮膚科	全身湿疹	5
00006	婦人科 花子	フジノカ ハナコ	女	1977/07/29	35	婦人科	クラミジア外陰陰炎	1
00009	内科 三郎	ナイカ サブロウ	男	1945/05/06	68	内科	急性気道炎	7
00007	内科 次郎	ナイカ ジロウ	男	1945/09/06	67	内科		2
00008	眼科 鼻仔	ガンカ ハナコ	女	1993/06/05	20	眼科		10
00005	整形外科 太郎	セイゲイ タロウ	男	1971/02/01	42	整形外科	腰椎椎間板症	4

2. 患者画像ビューアが開かれます。(画面説明1)

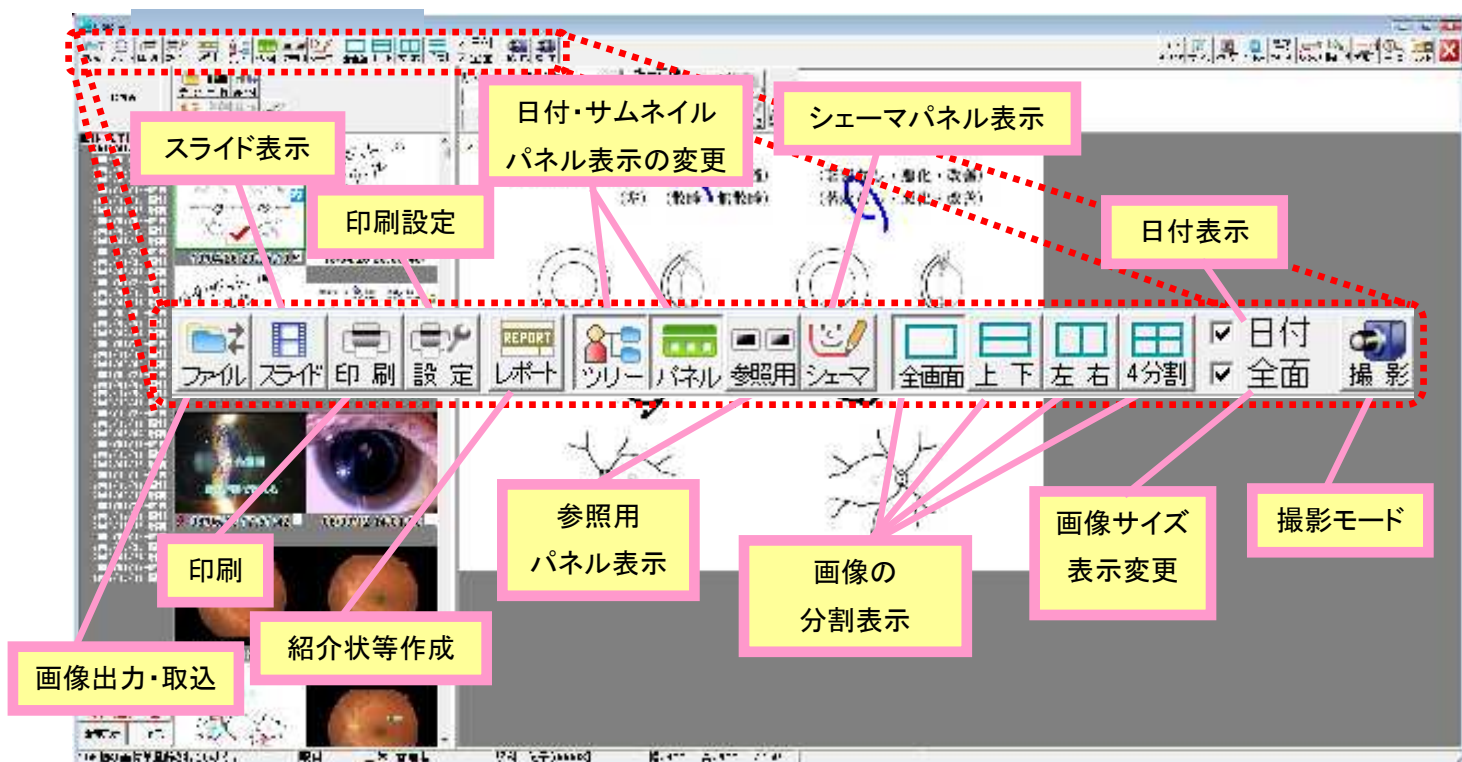


※画面説明2

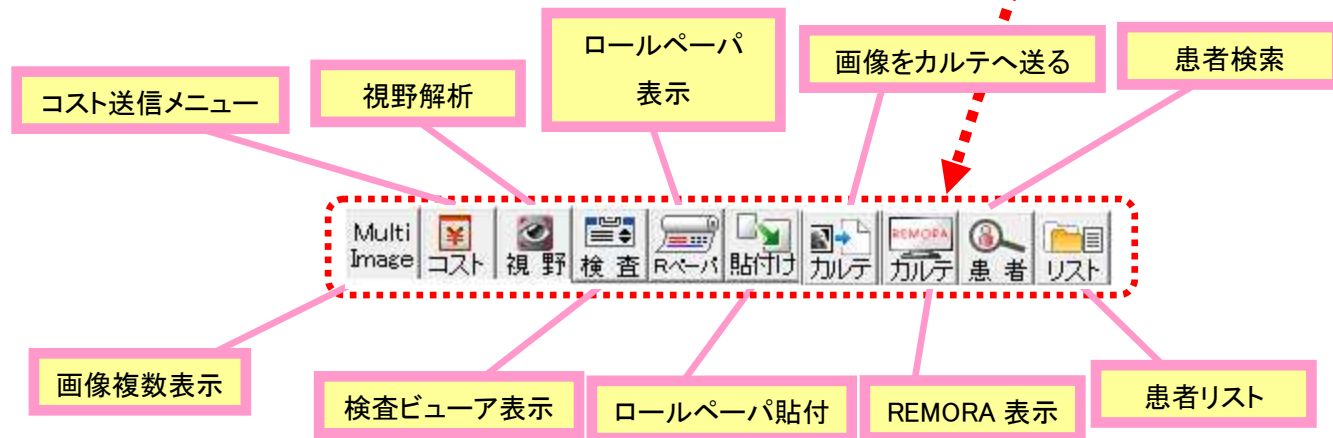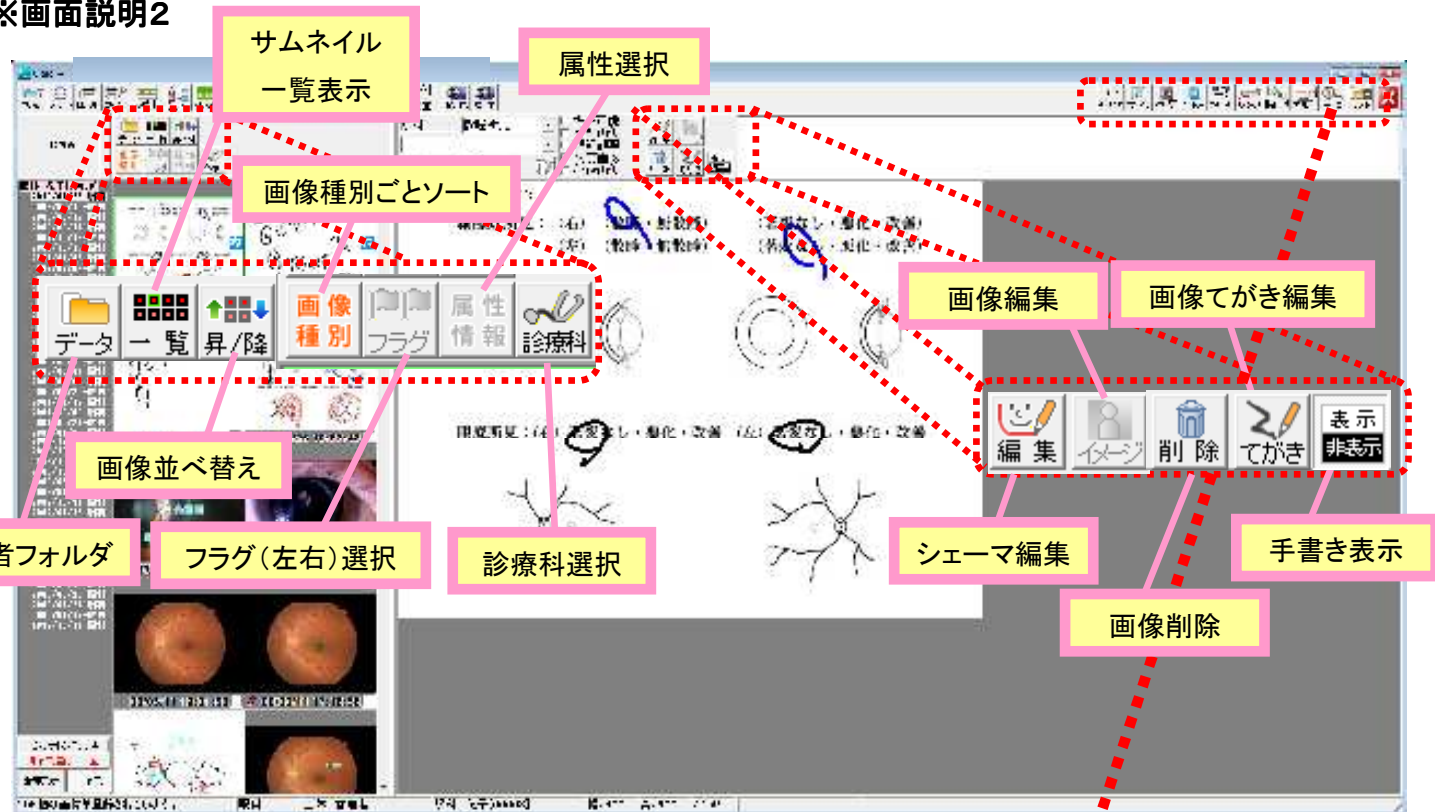


フットスイッチ

- ①スリットテーブルを引き出すか、撮影ボタンをクリックしますと撮影モード画面が開きます。
- ②フットスイッチの左側は静止画、右側は動画になります。

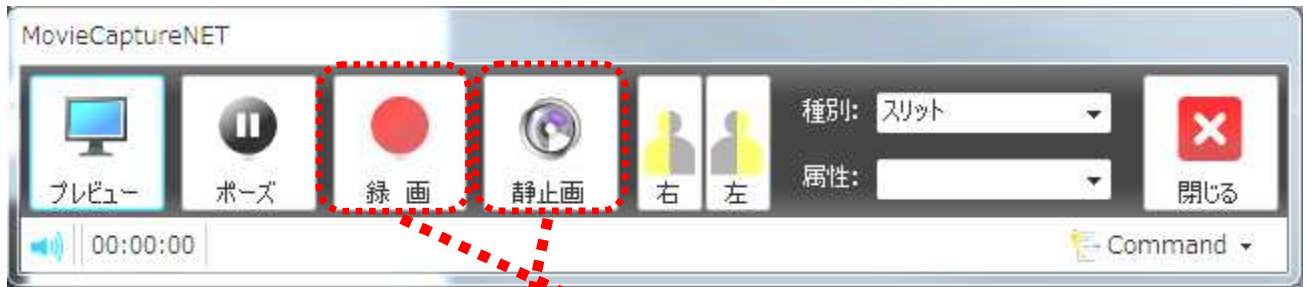


- ③  ボタンをクリックし、画像に左右フラグを付けます。

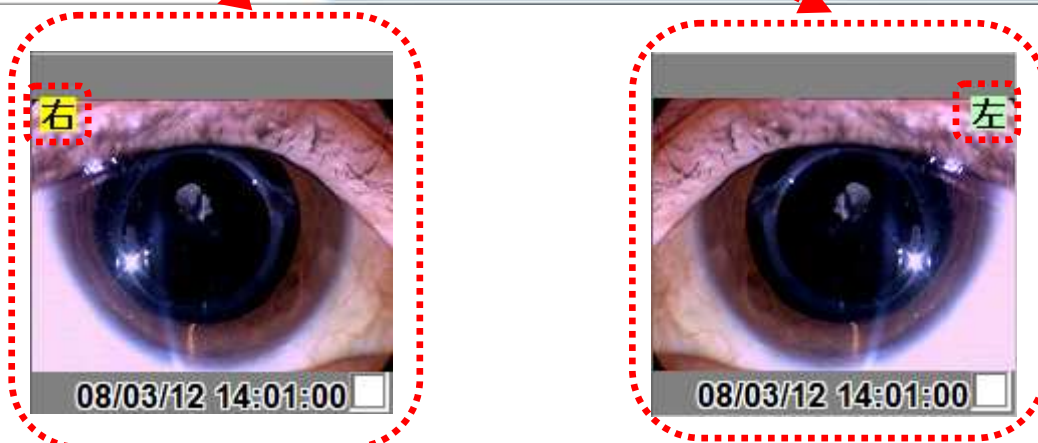


スキャナ画像の入れ方


① スキャナ画像フォルダを開きます。

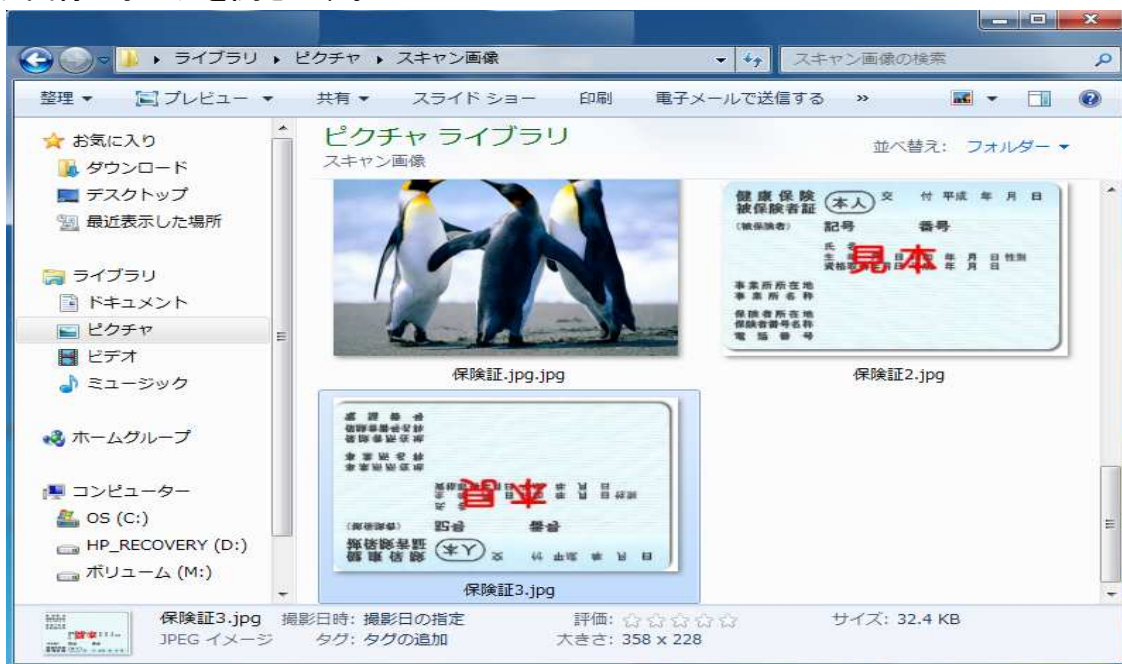

② 入れたい画像をドラッグ & ドロップで Claio に移動します。

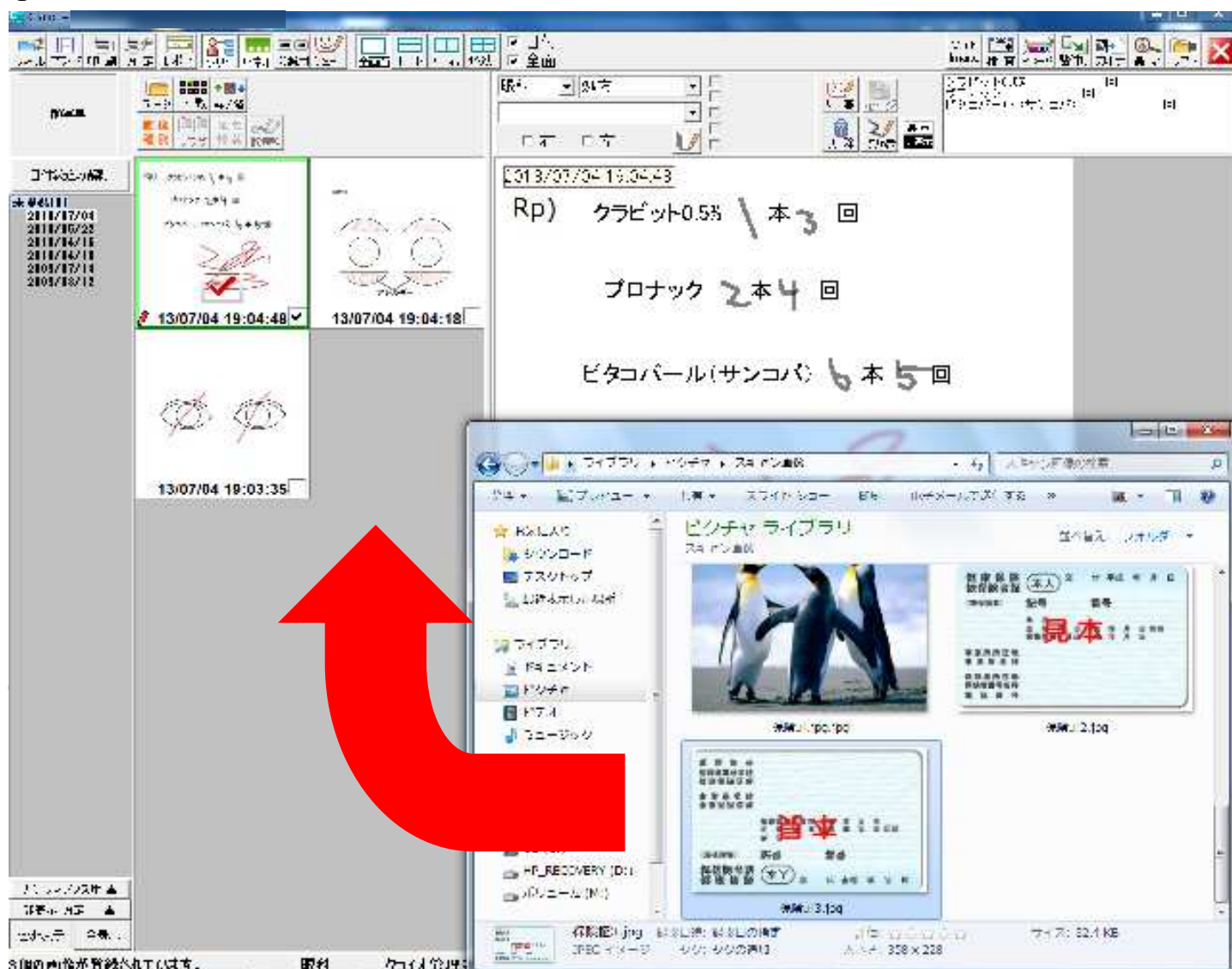


③入れた画像に対して▼ボタンをクリックし、種別一覧より画像種別をクリックします。

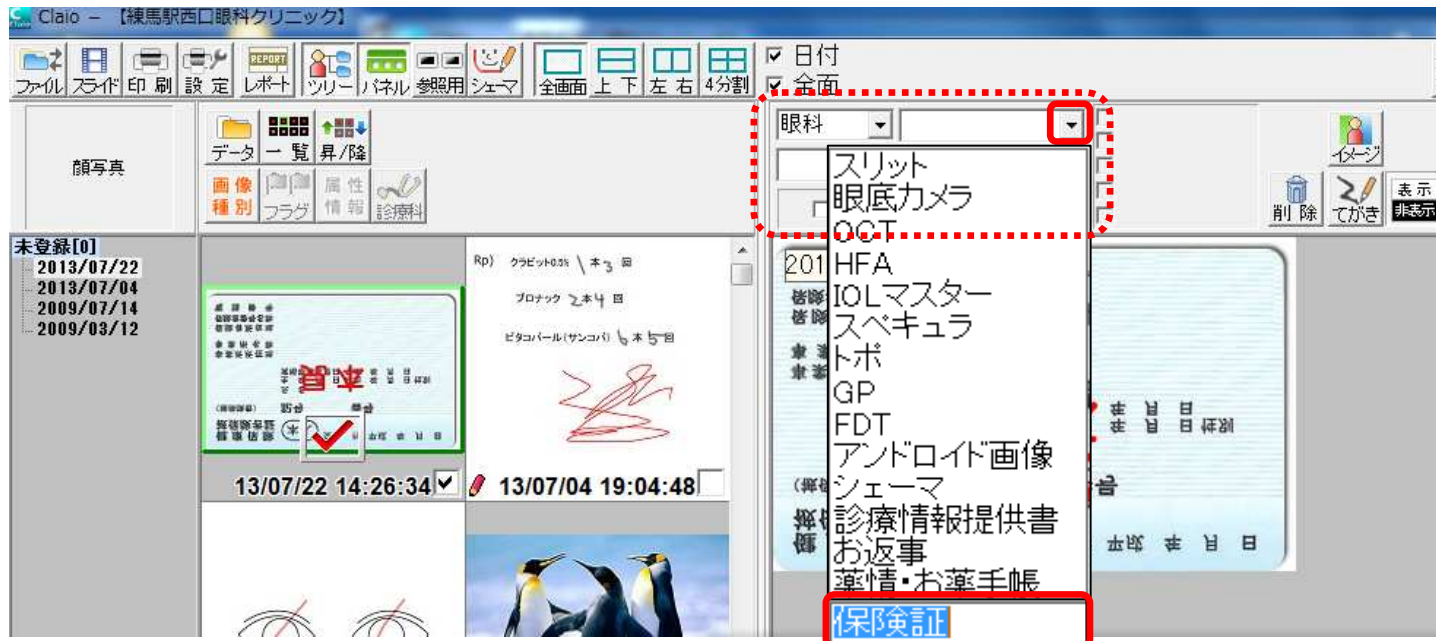


※画像の向きがずれてしまっている場合

①向きを修正したい画像を選択して  ボタンをクリックします。

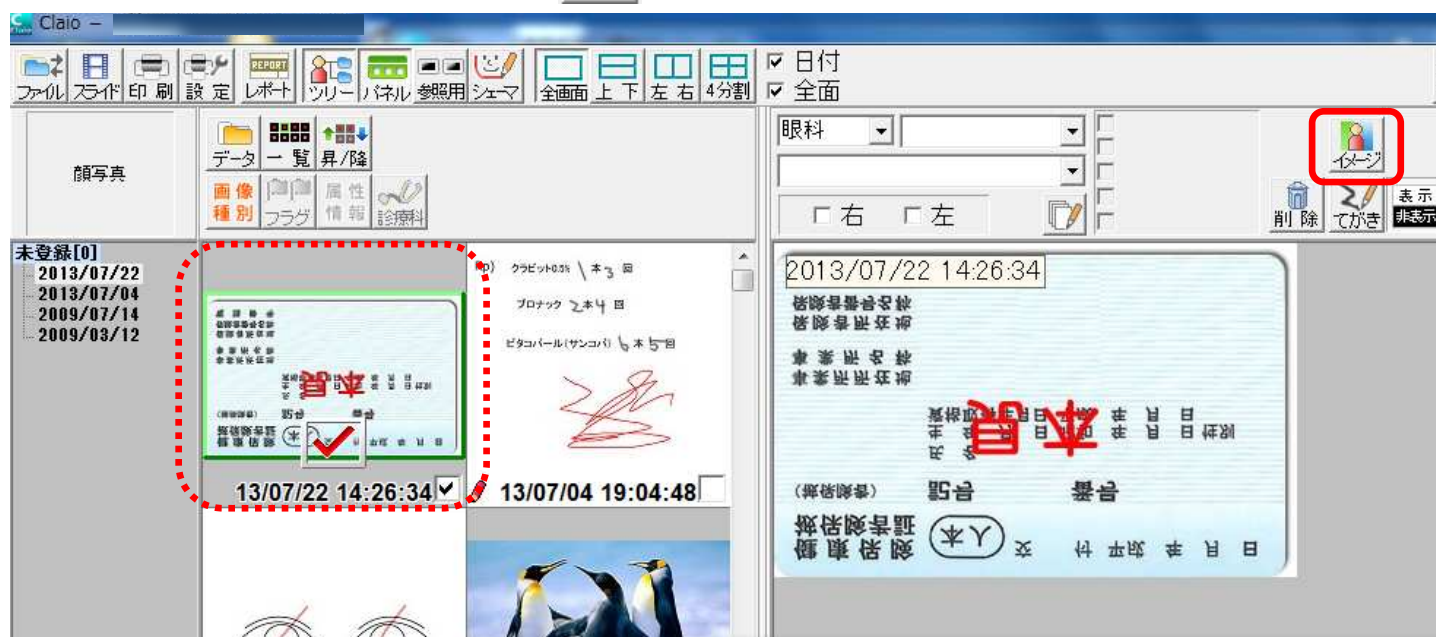

②回転/反転をクリックし修正したい方向に合わせたボタンをクリックしOKをクリックします。

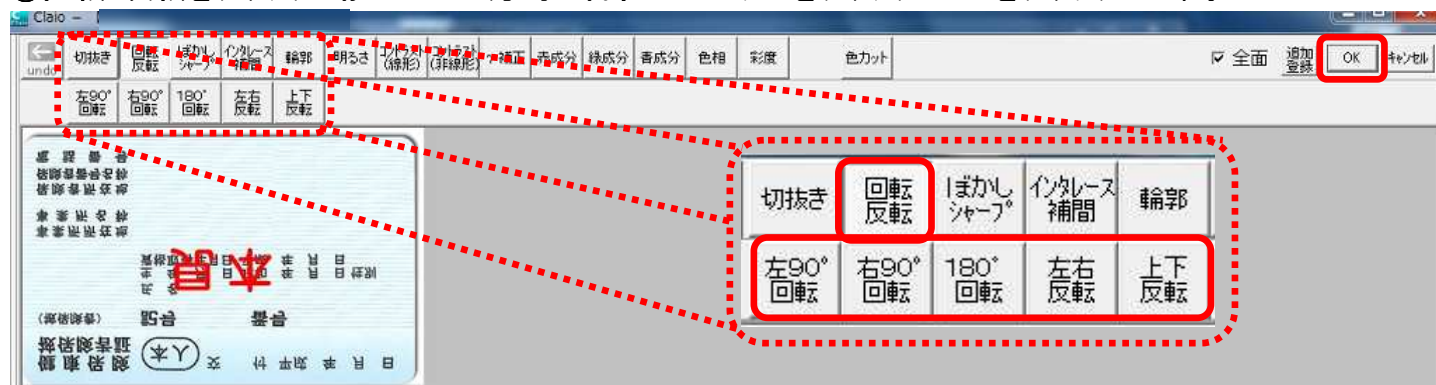

※画像を修正すると  ボタンが表示されます。



眼科

2013/07/22 14:26:34 付 平成 年 月 日

被保険者証

(被保険者) 記号 番号

氏 名 見本
生 年 月 日 和 年 月 日 性別
資格取得年月日 平成 年 月 日

事業所所在地
事業所名称
保険者所在地
保険者番号名称
電話番号

削除 ながき 表示 非表示

※  ボタンをクリックし  に表示が変わり修正前の画像を確認できます。



眼科

2013/07/22 14:26:34

被保険者証

(被保険者) 記号 番号

氏 名 見本
生 年 月 日 和 年 月 日 性別
資格取得年月日 平成 年 月 日

事業所所在地
事業所名称
保険者所在地
保険者番号名称
電話番号

削除 ながき 表示 非表示

画像の削除方法

①削除したい画像を選択し画面右側の表示欄に表示させ



ボタンをクリックします。



②削除確認メッセージが出るので、はいをクリックします。




画像種別


① **画像種別** をクリックします、その患者様に登録されている画像種別が一覧表示されます。

② 絞り込みたい画像種別にチェックをいれ、種別の名前をクリックし画像の絞り込みができます。

**画像種別
選択前**

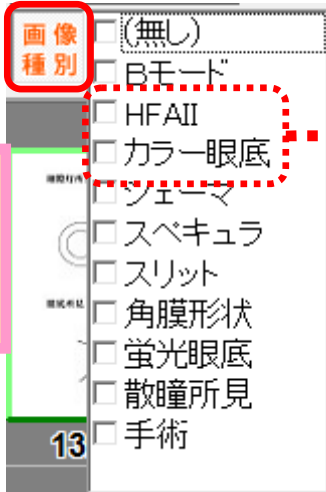


**画像種別
選択後**

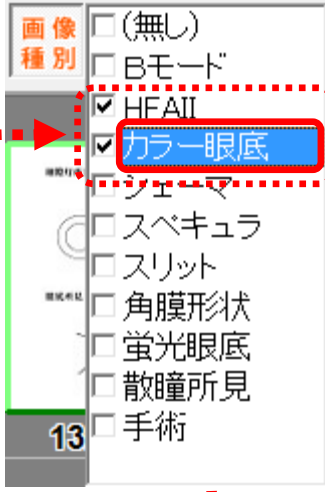

**画像種別
選択前**





**画像種別
選択後**

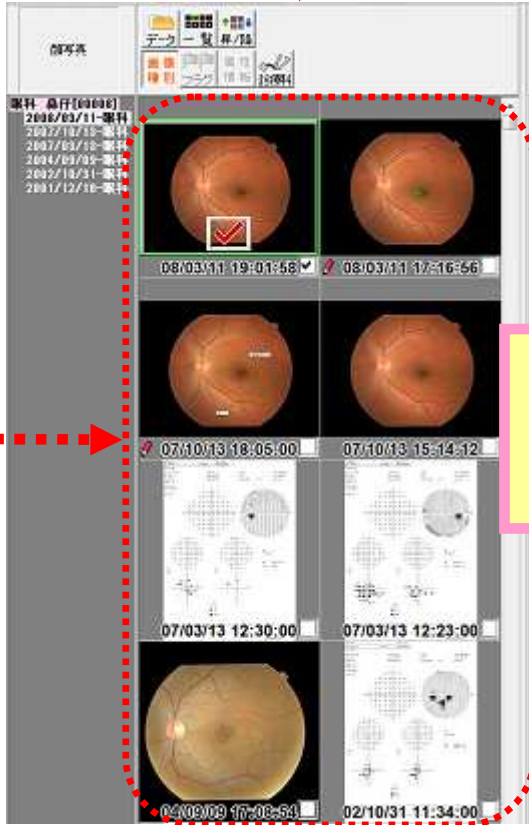


シェーマ

- ① シェーマ ボタンをクリックし、画面右側に表示されるシェーマ一覧からシェーマをクリックします。

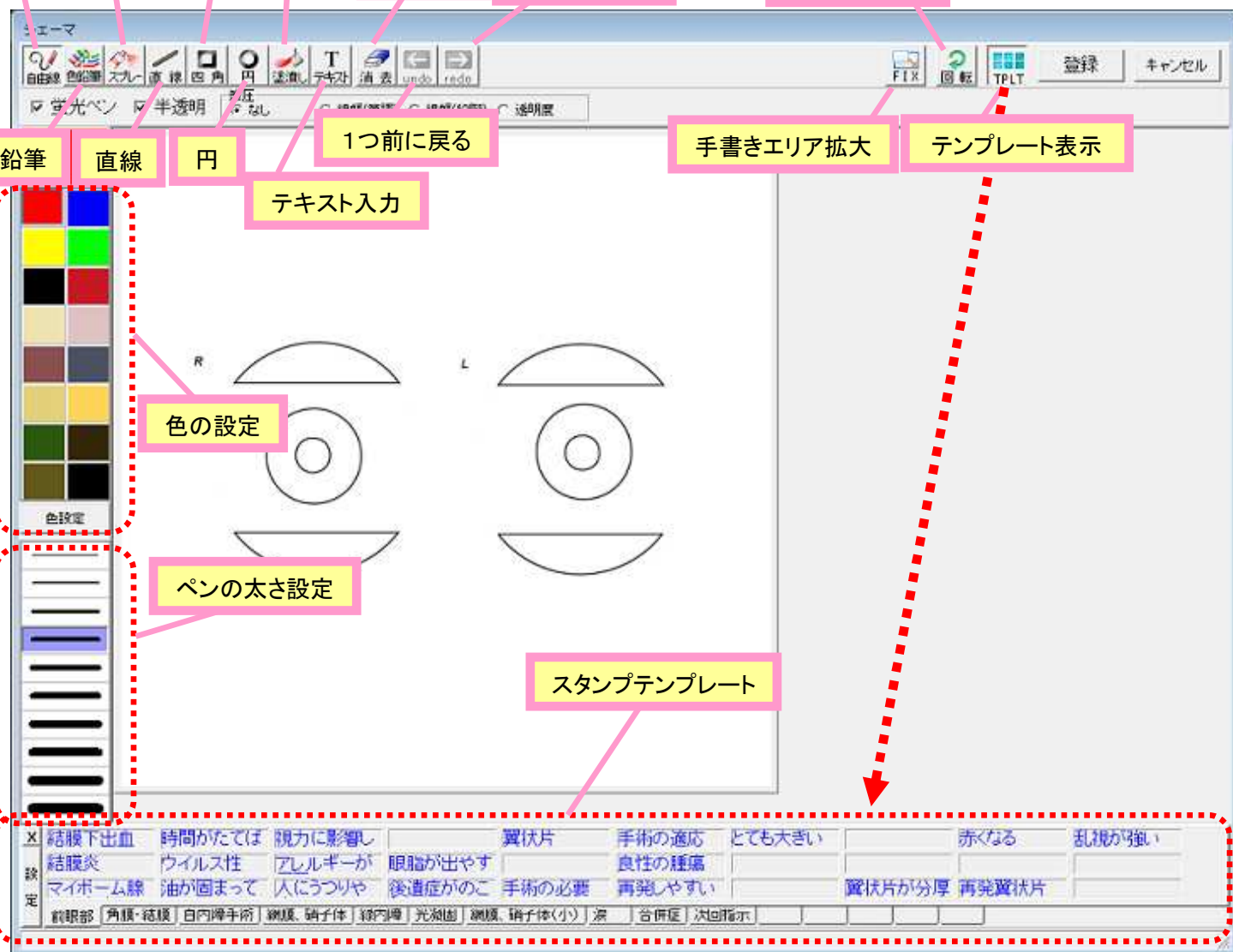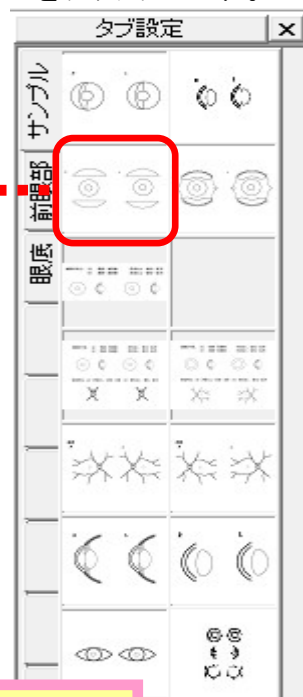


②シェーマに所見等を書き、登録をクリックします。

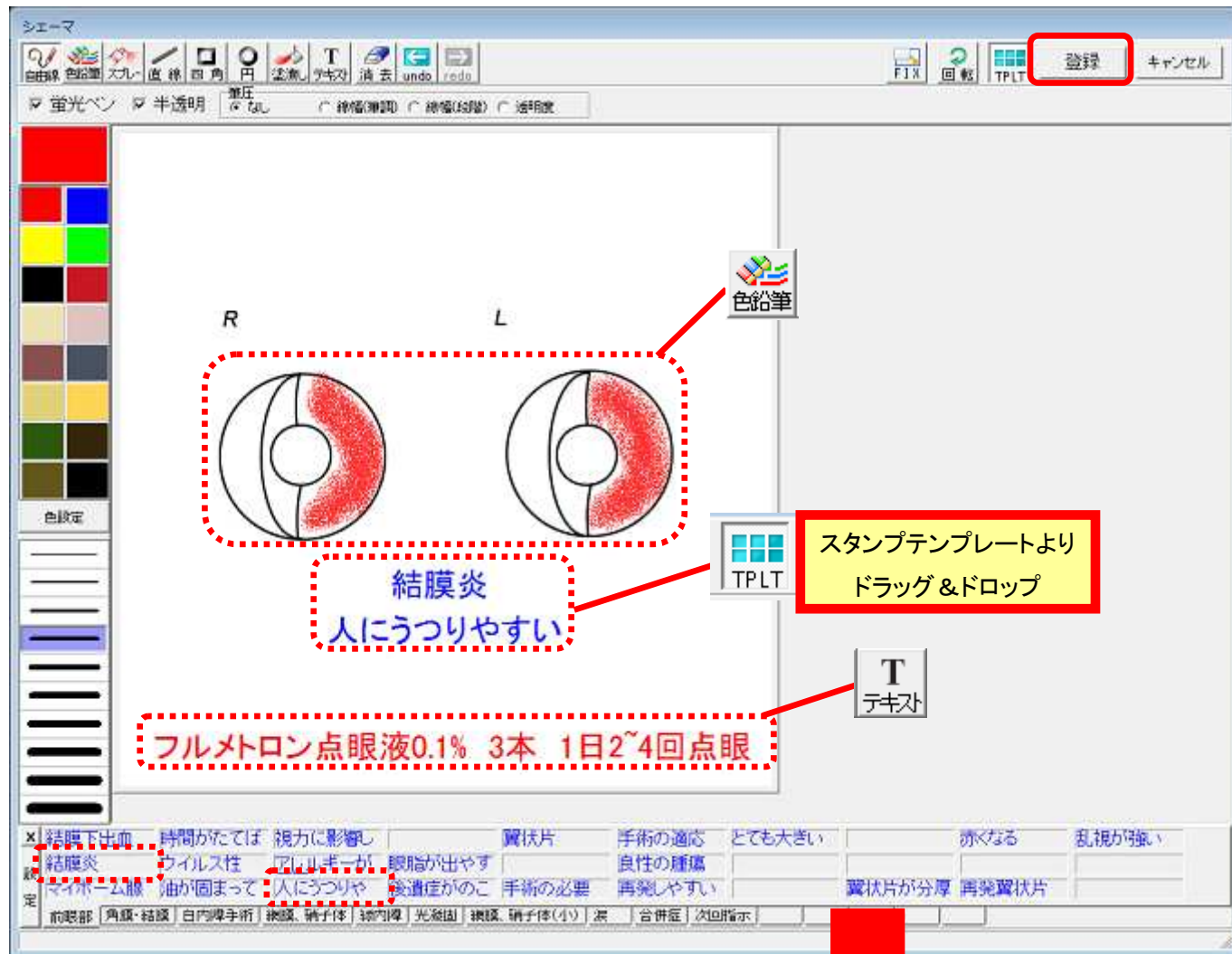

※再度シェーマを編集する場合は




ボタンをクリックします。

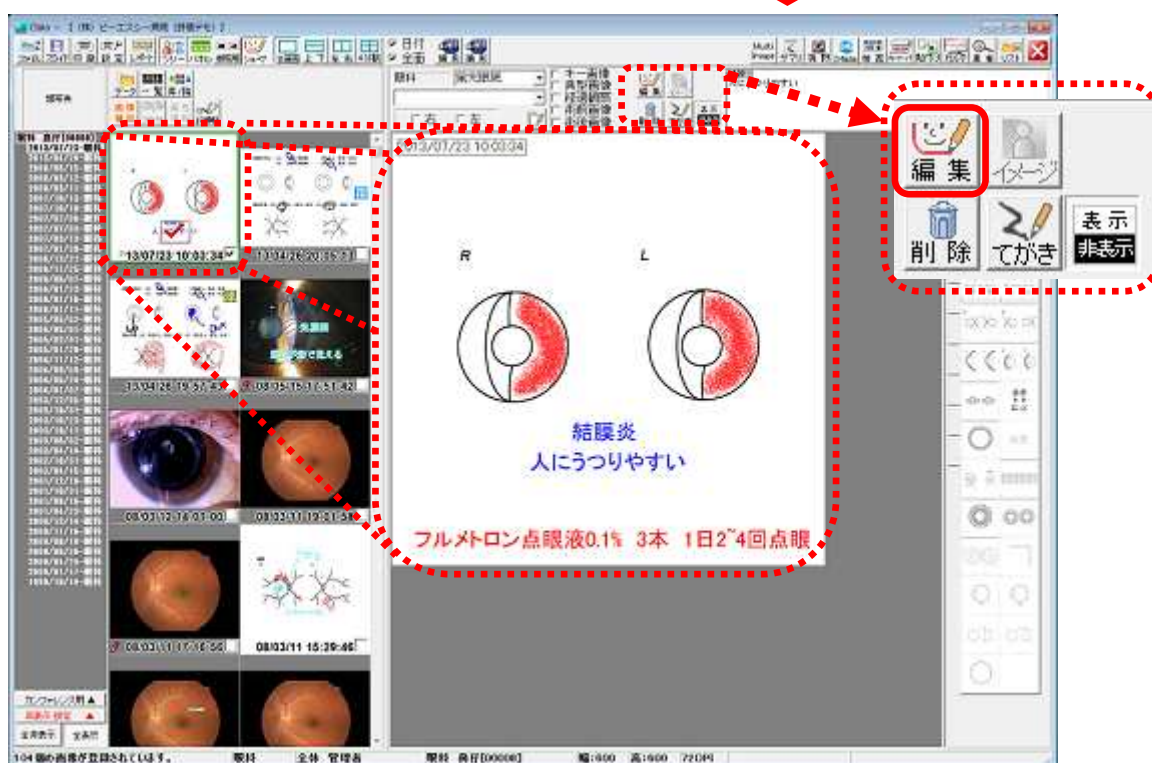


カルテへ送る

①カルテへ送りたい画像を選択し、 ボタンをクリックします。

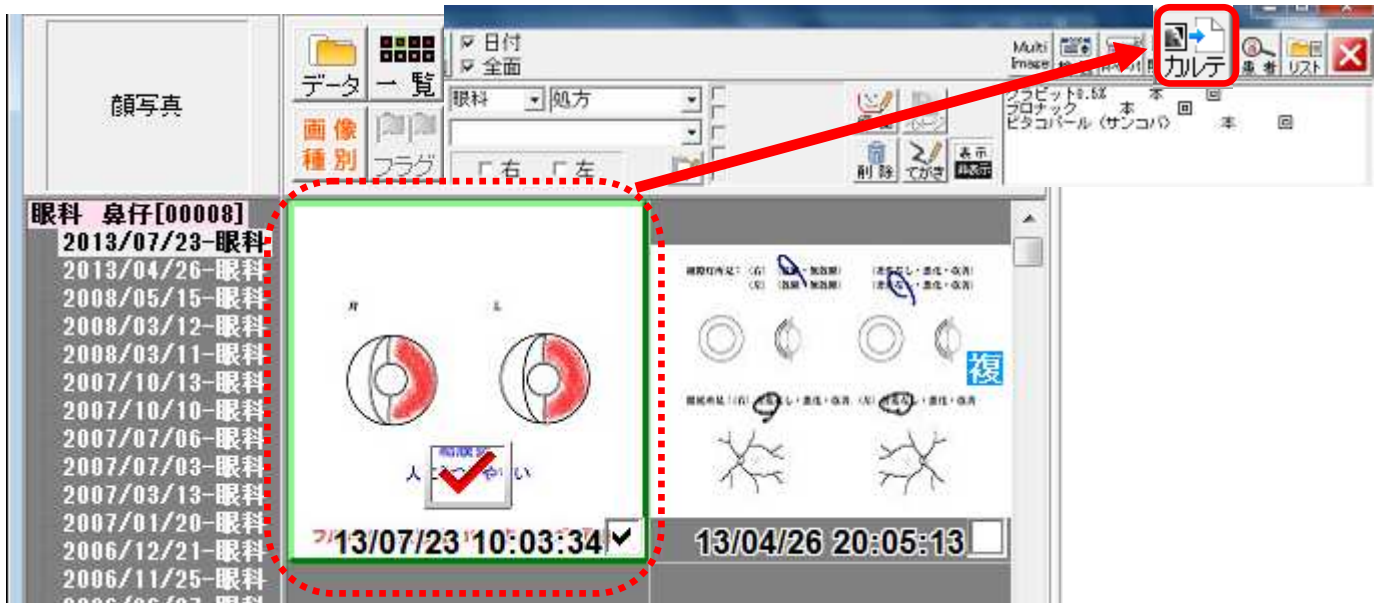


②画像がカルテへ送られます。

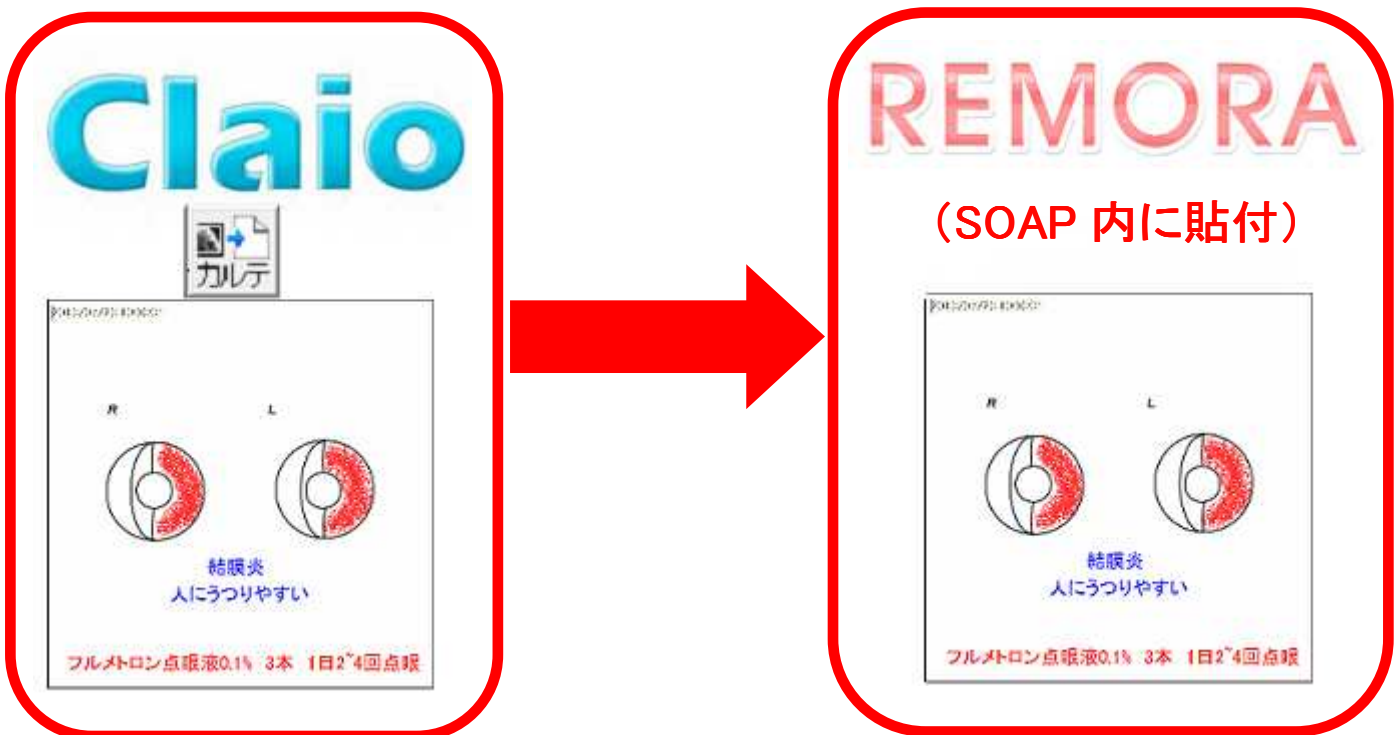

患者画像ビューアを閉じる

①画面右上の  ボタン(大きい方のボタン)をクリックします。

※または、次の患者様の受付表等のバーコードを読み取ります。

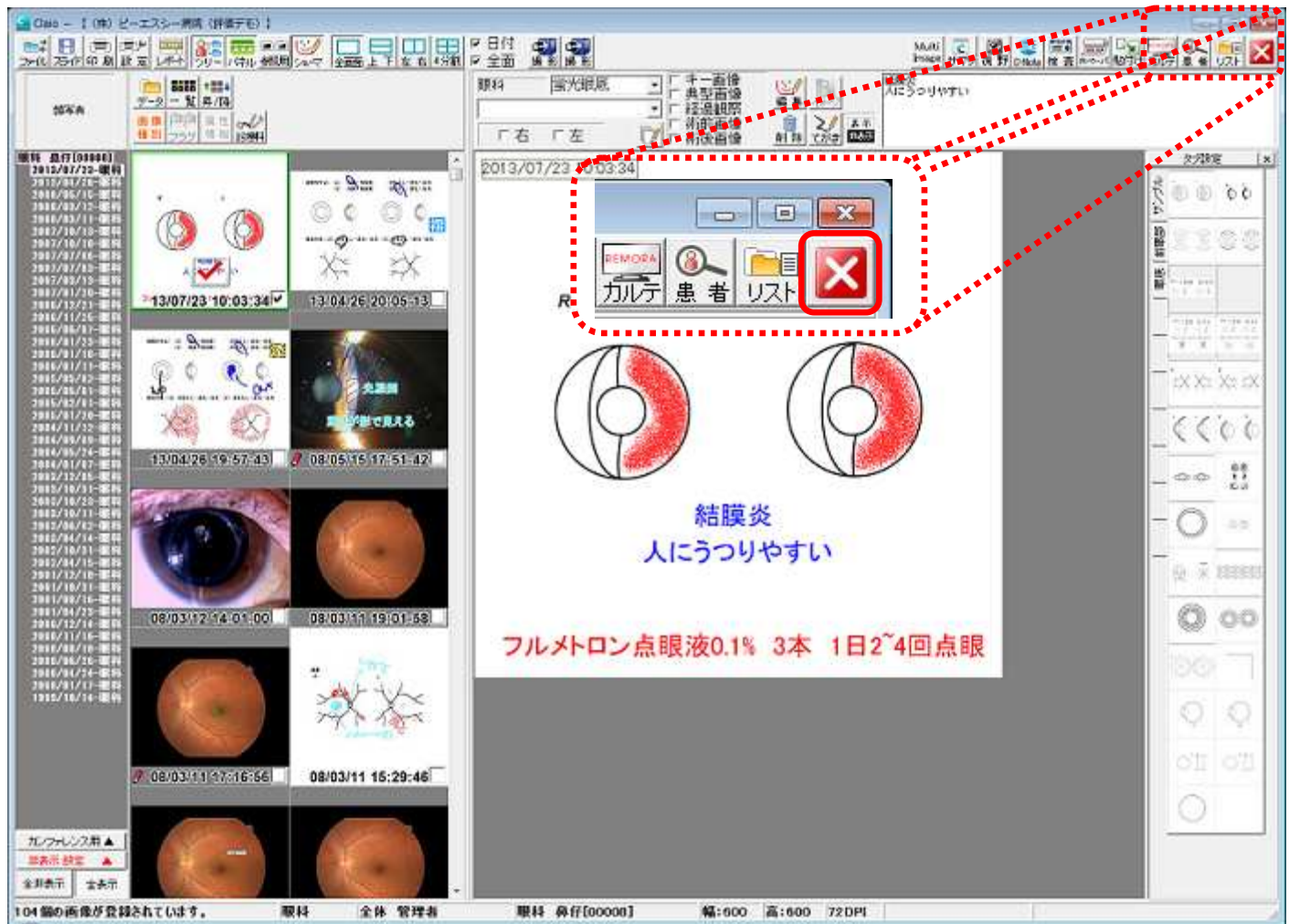

※シェーマ作成・編集、撮影モード展開中の状態では患者画像ビューアを閉じる、またはバーコード読み込みが出来ません。

