


☆ コンタクトレンズマスタ追加マニュアル ☆

① 検査ビューア画面内、【設定】をクリックします。

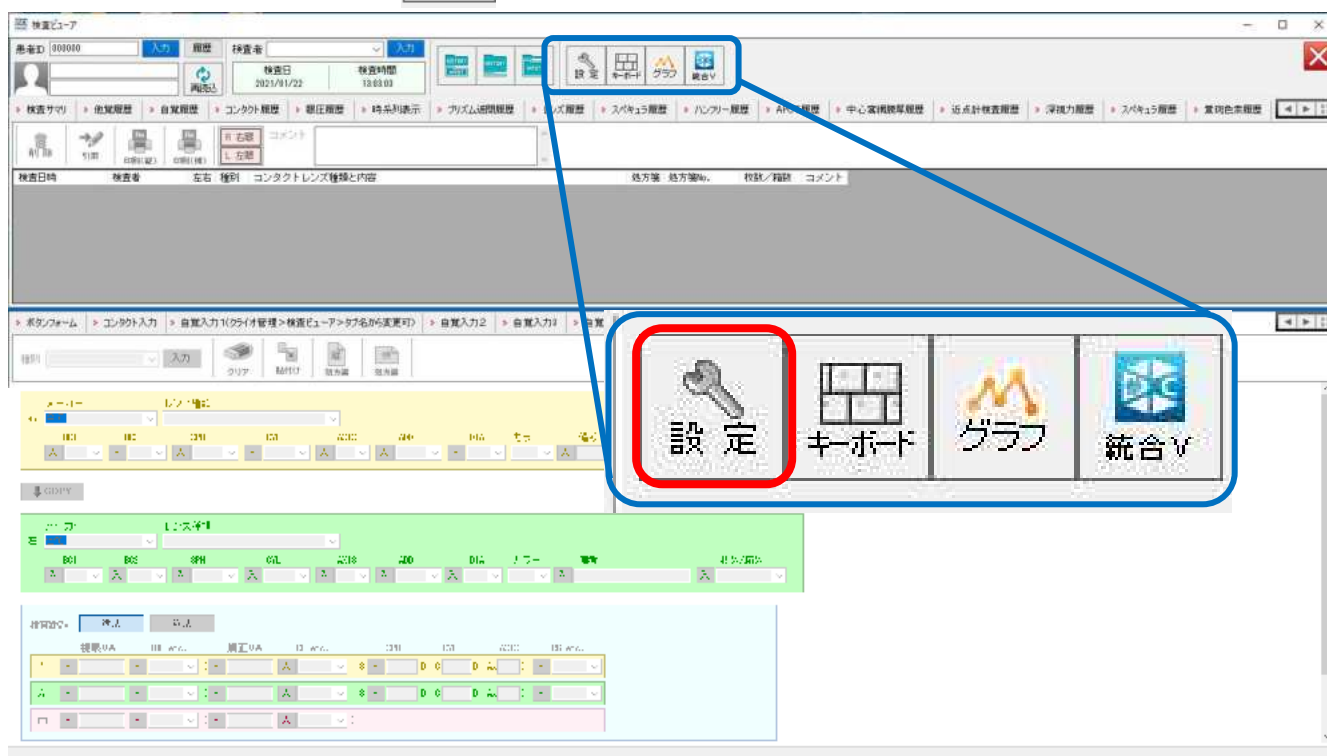

② 【コンタクトレンズ】タブをクリックします。




③ 【マスタ編集（一覧）】をクリックします。




④ 作業前の情報を担保するため、バックアップを取得します。

【エクスポート】をクリックします。

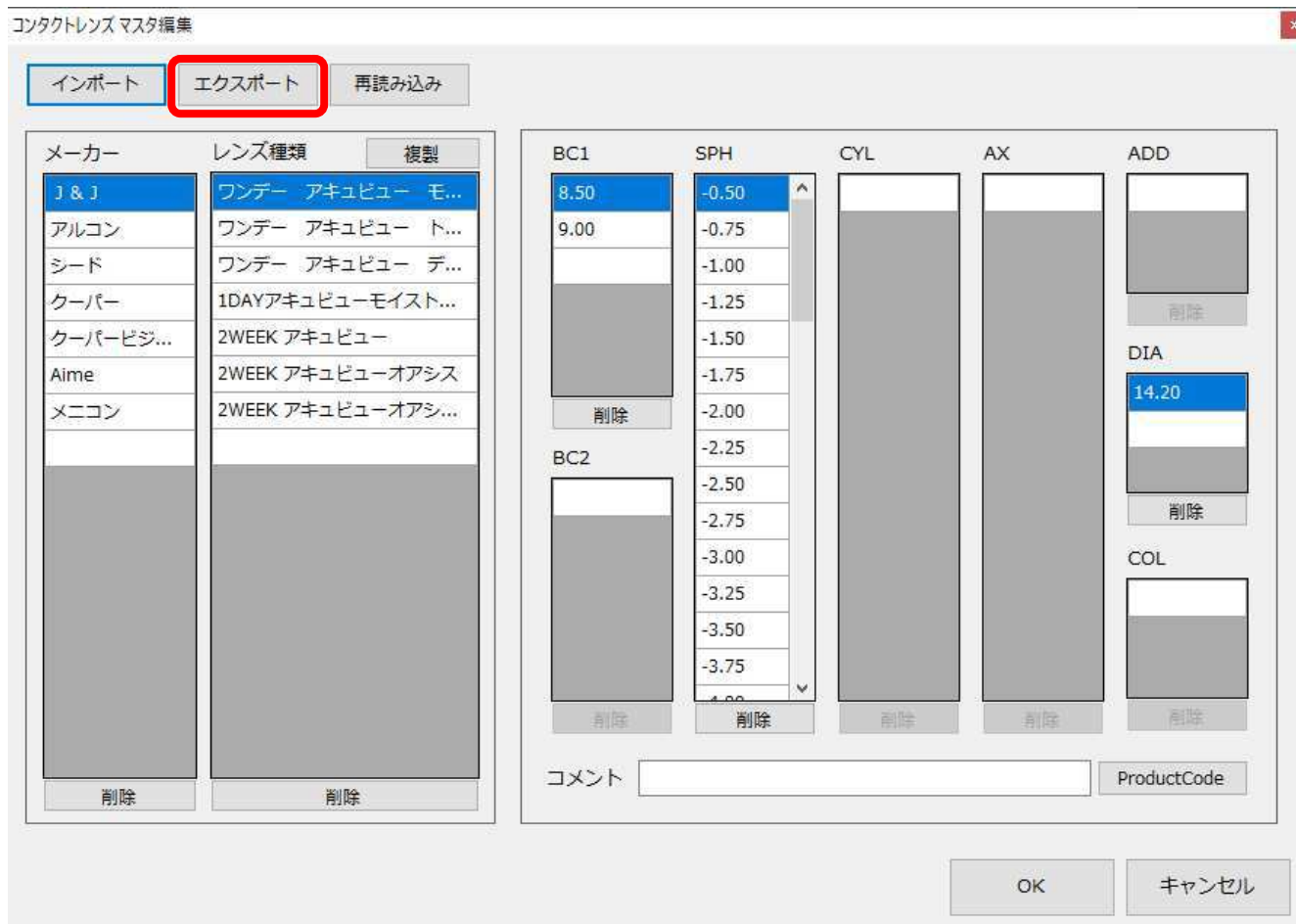


⑤ 任意の保存場所を選択し、ファイル名を入力、【保存】をクリックします。

ex) 保存場所：デスクトップ ファイル名：コンタクトレンズマスタ_20210101

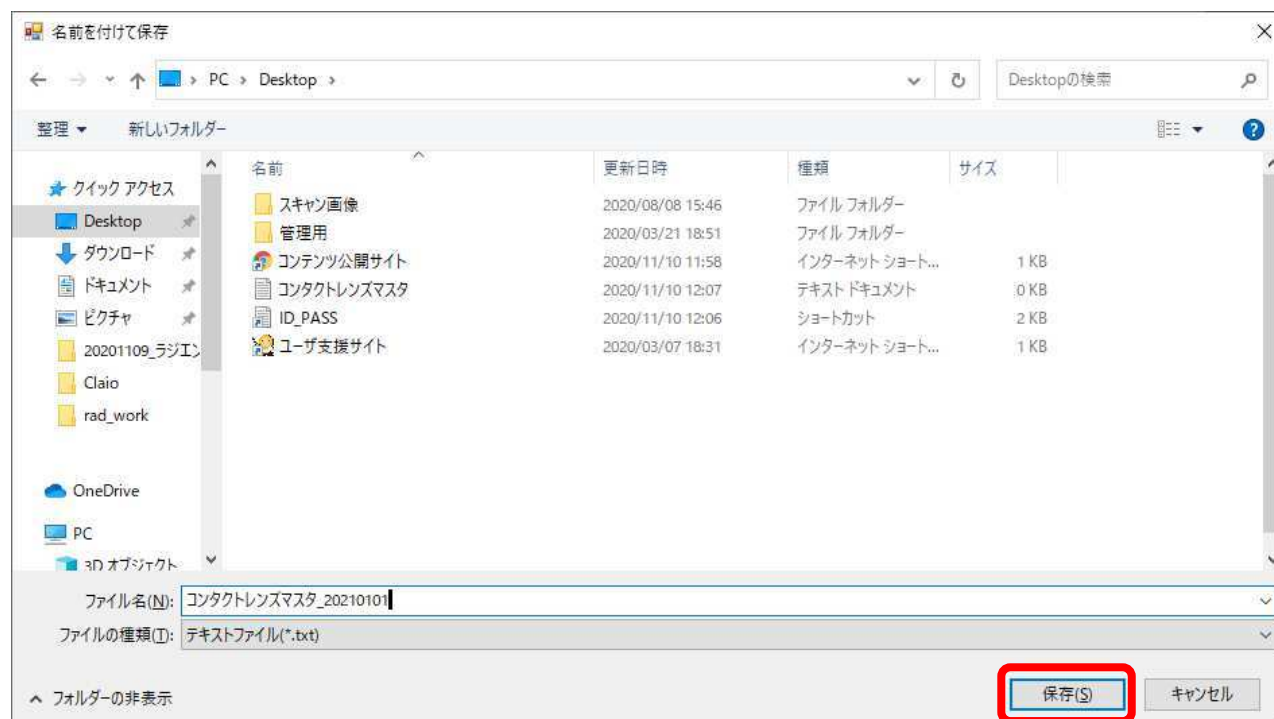

これにてバックアップ完了です。

⑥ 次に、変更・追加作業へ移ります。コンタクトレンズマスタ編集画面にて、メーカーを選ぶと、そのメーカーとして登録済みのレンズ種類が表示されます。BC や SPH、DIA 等レンズの詳細は画面右側で変更・追加が可能です。空欄に新たな値を入力することで追加、すでにある数字（文字）をダブルクリックして書き換えることで変更できます。

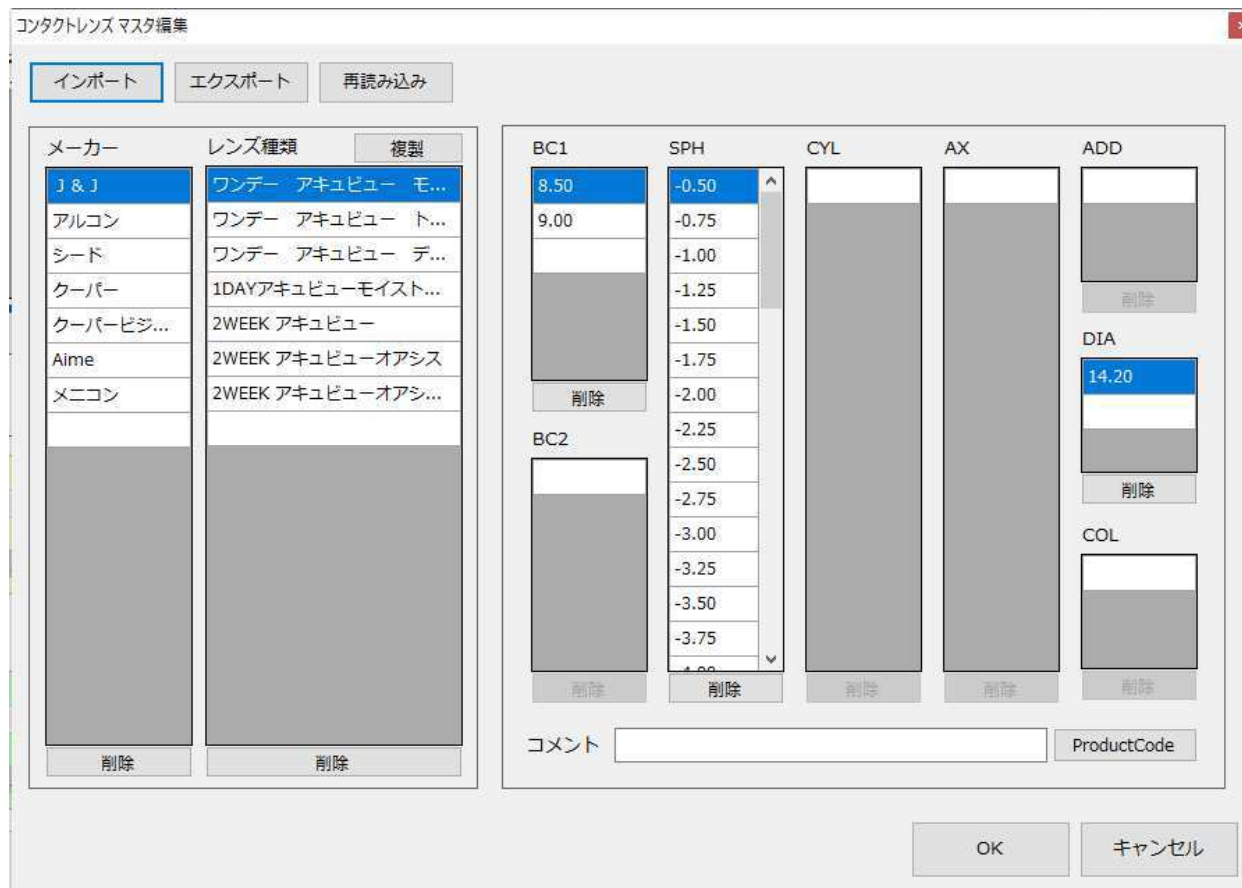

⑦ 全ての追加・編集が完了したら【OK】をクリックします。

コンタクトレンズマスタ編集

インポート エクスポート 再読み込み

メーカー	レンズ種類	複製
J & J	アイミーサプリーム	
アルコン	アイミーハードⅡ・バイトー...	
シード	アイミーハードⅡ・フロント...	
クーパー		
クーパービジ...		
Aime		
メニコン		

削除 削除

BC1	SPH	CYL	AX	ADD
6.00	-25.00	-12.00		
6.05	-24.50	-11.75		
6.10	-24.00	-11.50		
6.15	-23.50	-11.25		
6.20	-23.00	-11.00		
6.25	-22.50	-10.75		
	-22.00	-10.50		
	-21.50	-10.25		
	-21.00	-10.00		
	-20.50	-9.75		
	-20.00	-9.50		
	-19.50	-9.25		
	-19.00	-9.00		
	-18.50	-8.75		
	-18.00	-8.50		

削除 削除 削除 削除 削除

BC2

コメント ProductCode

OK キャンセル

⑧ DBにマスタを登録しますか?のメッセージが出るので、【はい】をクリックします。

確認

DBにマスタを登録しますか?

はい(Y) いいえ(N)

⑨ 登録に成功しました。のメッセージが出るので、【OK】をクリックします。

結果

登録に成功しました。

OK

⑩ 【OK】をクリックします。



⑪ 設定完了です。

すぐに使用したい場合には、一度端末を再起動して内容を確認してください。

ex) J&J 2WEEK アキュビューオアシスへ BC8.60 を追加したい。

① メーカーのJ & Jをクリックします。

コンタクトレンズマスタ編集

インポート エクスポート 再読み込み

メーカー	レンズ種類	複製
J & J	ワンデー アキュビュー モ...	
アルコン	ワンデー アキュビュー ト...	
シード	ワンデー アキュビュー デ...	
クーパー	1DAYアキュビューモイスト...	
クーパービジ...	2WEEK アキュビュー	
Aime	2WEEK アキュビューオアシス	
メニコン	2WEEK アキュビューオアシ...	

削除 削除

BC1
8.50
9.00
削除

SPH
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
削除

CYL
削除

AX
削除

ADD
削除
DIA
14.20
削除
COL
削除

コメント ProductCode

OK キャンセル

② レンズ種類の2WEEK アキュビューオアシスをクリックします。

コンタクトレンズマスタ編集

インポート エクスポート 再読み込み

メーカー	レンズ種類	複製
J & J	ワンデー アキュビュー モ...	
アルコン	ワンデー アキュビュー ト...	
シード	ワンデー アキュビュー デ...	
クーパー	1DAYアキュビューモイスト...	
クーパービジ...	2WEEK アキュビュー	
Aime	2WEEK アキュビューオアシス	
メニコン	2WEEK アキュビューオアシ...	

削除 削除

BC1
8.40
8.80
削除

SPH
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
-2.50
-2.75
-3.00
-3.25
-3.50
-3.75
-4.00
削除

CYL
削除

AX
削除

ADD
削除
DIA
14.00
削除
COL
削除

コメント ProductCode

OK キャンセル

④ 8.4、8.6、8.8 の並び順にするため、8.6 を 8.4 と 8.8 の間へドラッグします。
黒い太線が入っているところに移動します。

- 7 -